

車椅子、ソファからの立ち上がりセンサー
『い〜す』


型名 V550C



通報先



無線受信機AL

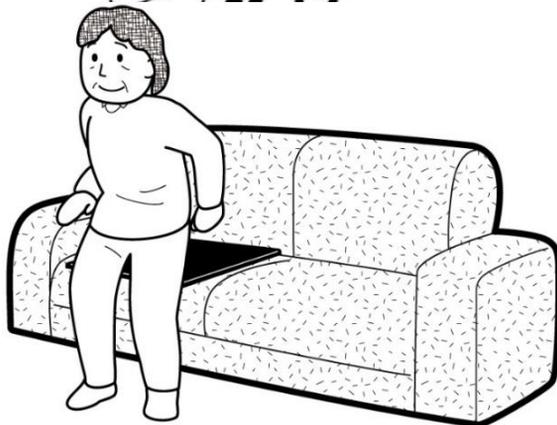

施設ナースコール
NC(オプション)

※『い〜す』はガードアイの
商標登録名です。

株式会社ガードアイ
TEL 0120-881-924

『い～す』の特徴

ご利用者とスタッフの動きを盛り込んださらに商品

- 1、利用者の小さな動き“モジモジ”誤動作低減機能付きです。
- 2、センサー検知信号を無線送信で専用受信機や施設ナースコールに送ります。
- 3、音声と音楽を選択できる無線受信機とセットです。
音声例：“センサーが反応しました”
“すぐ来て下さい”
- 4、施設ナースコールと連動できます。
(ナースコール端子ピン数、形状に依存致しません)
- 5、本体電池切れをLEDでお知らせいたします。
(単4電池 4本使用)

実 使 用 例



座面にセンサーを載せます。



ボタンを押して無線チェックを行います。



クッションをかぶせて出来上がりです！



本体を車いすの背面袋に入れて、使用開始です。

『い〜す』 本体



- 本体
- 230g (電池込)
 - 単4電池 4本
 - 無線送信



本体背面



- 無線受信機
- 160g
 - 単3電池 3本



人が使う商品の進化が止まらない！

『い～す』

- 誤作動極低減機能搭載
- 面接触のセンサー採用で検知が確実、正確
- “呼んでま～す” 人の声でお呼び出しも
- 光と音が自動で同時に停止
- オール無線越続
- ナースコール連動（オプション）




一番人気！
♪サクラ～
サクラ～



椅子の座面に敷くセンサー
（軟質型）



センサー

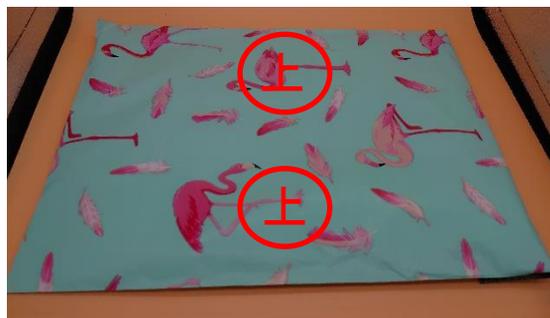


最後に簡易防水対策ビニル袋で梱包
（350g 袋交換可能）

除圧タイマー

一定時間経過後に、お知らせするい～すを開発中です。

例：1時間タイマー

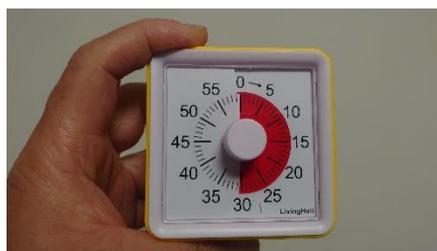

60分タイマー

無線

